

DEZINFECTANȚI

VIRUSOLVE® + EDS

DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT/ STERILIZANT LA RECE
PENTRU ECHIPAMENTE MEDICALE ȘI ENDOSCOAPE

Virusolve® + EDS este un dezinfectant de nivel înalt (HLD) destinat decontaminării dispozitivelor medicale și a instrumentarului chirurgical, stomatologic și endoscopic.

Virusolve® + EDS este un dezinfectant de nivel înalt și un sterilizant patentat. Formula sa nu conține aldehide periculoase sau derivați ai clorului.

Virusolve® + EDS este un dezinfectant de nivel înalt (HLD)/ sterilizant foarte eficient împotriva sporilor bacterieni, micobacteriilor, bacteriilor, fungilor și virusurilor. Produsul este destinat eliminării riscului de infecție încrucișată cu spori, TB, virusuri, fungi și bacterii.

Virusolve® + EDS este sigur de utilizat pentru toate tipurile de endoscoape, flexibile sau rigide.



Principalele calități ale Virusolve® + EDS:

- Dezinfectant de nivel înalt/ sterilizant la rece
- Nu deteriorează instrumentarul medical
- Compatibilitate excelentă cu materialele
- Sigur la utilizare
- Inodor
- Nu se fixează pe suprafețe
- Nu este coroziv
- Timp de acțiune - 5 minute 20 °C
- Nu necesită activator
- Rentabil
- Conform cu standardul EN14885 în ce privește proprietățile dezinfecțanților

Ambalaj

Concentrat

- Recipient 125 ml
- Recipient 250 ml
- Recipient 1 l
- Recipient 5 l
- Recipient 10 l
- Recipient 25 l



Virusolve® + EDS este un produs superior patentat destinat decontaminării instrumentarului medical, endoscopic, chirurgical și stomatologic.

DEZINFECTANȚI

Mod de utilizare

Reprocesarea instrumentarului - Dezinfecție de nivel înalt


Potrivit pentru toate tipurile de instrumentar medical, critic și non-critic și pentru toate tipurile de dispozitive medicale, inclusiv pentru cele sensibile termic.

Pentru dezinfecția manuală a instrumentarului și a echipamentelor medicale


Etapa 1:

•Asigurați-vă că instrumentele au fost curățate bine în prealabil (cu produse din familia Viruzyme sau Virudent N Manual) și ulterior clătite.

Etapa 2

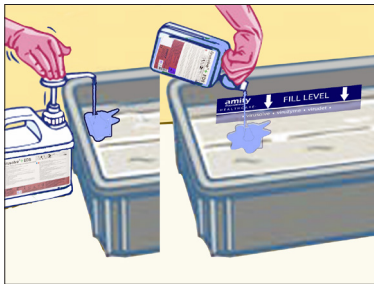


1. Diluați Virusolve®+ EDS în apă în concentrație 2,5% (25 ml/l).

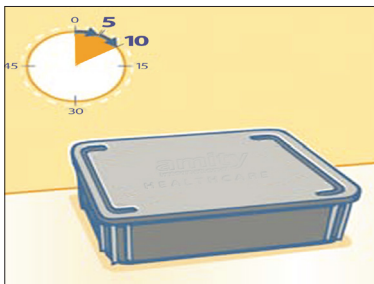

2. Înmuiați echipamentul medical în această soluție timp de 5 minute, asigurând-vă că toate șanțurile și canalele sunt acoperite cu soluție. Aceste condiții sunt necesare pentru a obține activitate bactericidă, fungică, virucidă, micobacterică și sporicidă.

Notă: Asigurați-vă că toate cavitățile sunt acoperite cu soluție Virusolve®+ EDS și că nu există bule de aer.

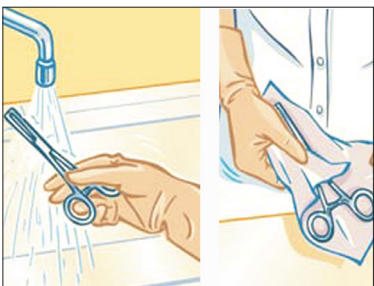

3. Clătiți în apă sterilă și uscați cu material steril.

Dispozitivul medical este acum pregătit pentru utilizare.

Reutilizarea produsului pentru dezinfecție

Soluția Virusolve®+ EDS a demonstrat eficiența la reutilizare în prezența factorilor de contaminare din sol organic și a încărcăturii microbiologice. Concentrația constituenților activi Virusolve®+ EDS trebuie verificată pe toată durata utilizării, prin intermediul kitului de testare a concentrației sau a testelor bandă Virusolve®+ EDS Concentration. Produsul Virusolve+ EDS trebuie eliminat din uz la 14 zile de la diluare, chiar dacă concentrația constituenților activi este la sau deasupra nivelului MEC. Pentru detalii, consultați PIBS 08-006.

VIRUSOLVE®+ EDS

DEZINFECTANT DE NIVEL ÎNALT/ STERILIZANT LA RECE PENTRU ENDOSCOAPE ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE

Proprietăți microbiologice ale Virusolve®+ EDS

Activ împotriva	Standarde	Timp de contact
Sporilor	EN13704 EN14347	2 minute 1 minut
Micobacteriilor	EN14348 Mycobacterium terrae Mycobacterium tuberculosis EN14563 Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 minut 1 minut 5 minute 5 minute
Bacteriilor	EN1276, EN13727, EN14561	1 minut 5 minute
Virusurilor	EN 14476 Polio & Adeno HIV, Hep B & C	5 minute 1 minut
Fungilor/ Levurilor	EN1275, EN1650 EN14562, EN13624	1 minut 5 minute



Amity Limited, Libra House, West Street,
Worsbrough Dale, Barnsley, South Yorkshire,
S70 5PG, UK

T: +44 (0) 1226 747660

F: +44 (0) 1226 291936

E: sales@amityinternational.com

WWW.AIHC.CO.UK

© Toate drepturile rezervate Amity Limited 2018

DISTRIBUIT DE: