


Viruzyme® Eco

Dezinfectant economic protolitic triplu-enzimatic

Viruzyme Eco este un dezinfectant biologic ce are la bază un amestec protolitic de enzime și surfactanți sinergici, conceput pentru decontaminare manuală și ultrasonică a instrumentarului medical.

Atributele principale ale Viruzyme Eco sunt:

- Dezinfectant biologic foarte eficient, conceput pentru îndepărtarea agenților contaminanți proteici și organici de pe instrumentarul medical.
- Are la bază un amestec de protează, amilază și lipază, enzime ce sporesc gradul de siguranță al decontaminării.
- Parfum plăcut.
- Compatibilitate excelentă cu materialele.
- Nu se fixează pe suprafețe.
- Necoroziv, nu deteriorează suprafețele sensibile.
- Compatibil cu apa dură.
- Nu necesită clătire.

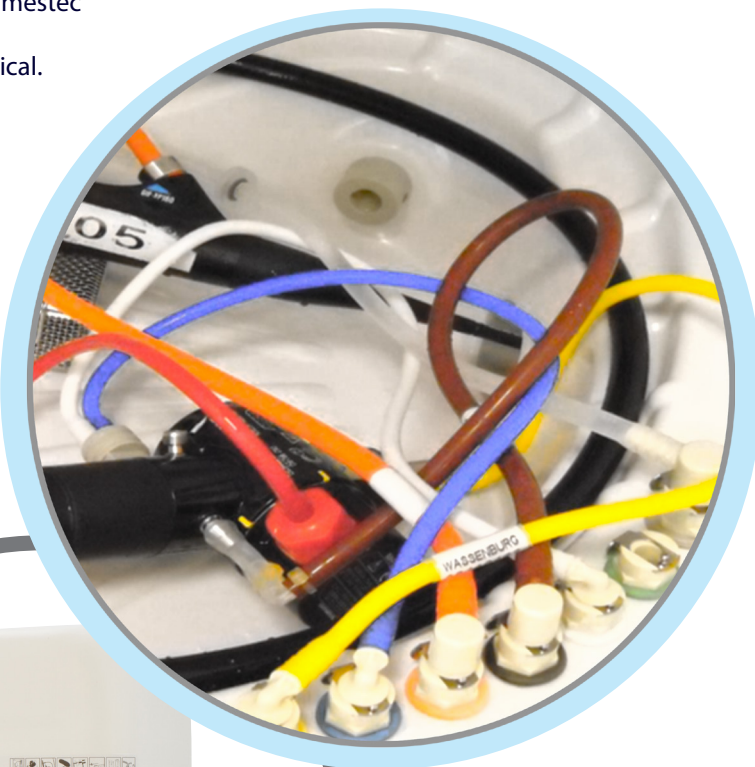

Viruzyme® Eco

Dezinfectant economic protolitic triplu-enzimatic

Dezinfectant pentru dispozitive de endoscopie și echipamente medicale

General

Viruzyme Eco este un dezinfectant biologic ce are la bază un amestec de enzime protolitice și surfactanți sinergici, destinat dezinfecției manuale și ultrasonice a instrumentarului medical, chirurgical, stomatologic și de endoscopie.

Formula Viruzyme Eco este foarte sigură în procese de dezinfecție și curățare manuală sau ultrasonică atât a instrumentarului medical, stomatologic și de endoscopie, cât și a instrumentarului medical delicat, acționând eficient împotriva unei game ample de agenți contaminanți.

Viruzyme Eco este un produs eficient pentru îndepărtarea agenților contaminanți proteici și organici de pe suprafețe, inclusiv a reziduurilor uscate de sânge sau țesut.

Viruzyme Eco este înregistrat ca Dispozitiv medical de Clasa I

Ambalaj

- Recipient 1 L
- Recipient 5 L
- Recipient 10 L
- Recipient 25 L
- Canistră 200 L
- Container IBC 1,000 L



Proprietăți ale Viruzyme

Viruzyme Eco este biodegradabil.

Viruzyme Eco nu este periculos, când este diluat conform instrucțiunilor furnizate de producător.

Produsul brut este clasat ca substanță iritantă și se recomandă evitarea contactului cu ochii sau cu pielea.

Organismele utilizate în această formulă se regăsesc în natură și sunt cunoscute ca fiind nepatogene pentru oameni și animale.

Pentru detalii suplimentare, consultați Fișa de siguranță a produsului.

Aspect	Lichid limpede de culoare turcoaz.
Miros	Parfum proaspăt, plăcut.
pH	9 unități (soluție pură) 7,9 unități (1% concentrație)
Densitate g/cm ³ @ 20°C	1.05 (net)
Solubilitate în apă	Complet miscibil
Flashpoint (Abel closed cup)	Nu există

Utilizare specifică

Formula Viruzyme Eco este foarte sigură în procese de dezinfecție și curățare manuală sau ultrasonică, atât a instrumentarului medical, stomatologic și de endoscopie, cât și a instrumentarului medical delicat, acționând eficient împotriva unei game ample de agenți contaminanți.

Instrucțiuni de utilizare


Viruzyme Eco este furnizat ca produs concentrat care necesită diluare înainte de utilizare.

Recomandare de utilizare:

Pentru curățare manuală/ ultrasonică a instrumentarului și echipamentului medical:



Diluți Viruzyme Eco cu apă 3 - 10ml/L (0,3 - 1%).

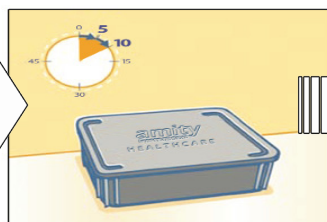


Scufundați instrumentarul timp de 10 minute în soluția diluată Viruzyme Eco (Permiteți un timp de acțiune de 3 minute pentru agitare ultrasonică), la temperaturi între 20°C și 40°C.

Asigurați-vă că toate fantele și spațiile sunt complet acoperite cu fluid de curățare și că nu există goluri de aer.



Curățați și spălați toate componentele și folosiți peria pentru a îndepărta depozitele mai dure.

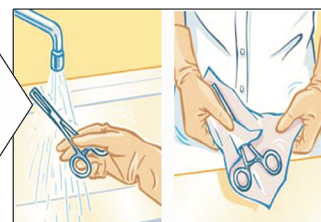

Clătiți și pregătiți pentru următoarea fază a procesului de decontaminare.



Distribuit de:

Amity International,
Libra House, West Street,
Worsborough Dale,
Barnsley, S70 5PG, UK

Tel: +44 (0) 1226 770787
Email: sales@amityinternational.com
www.amityinternational.com

CE 0120

